

## 組裝底座與防傾倒底座加穩裝置




1. 取出腳座及氣壓棒。
2. 將氣壓棒直接用力插入腳座圓孔中。




3. 防傾倒底座加穩裝置裝至九分滿。
4. 將防傾倒底座加穩裝置穿過器壓棒，其底部溝槽跨置於腳座上。
5. 請注水並旋緊旋蓋。

## 組裝控制箱

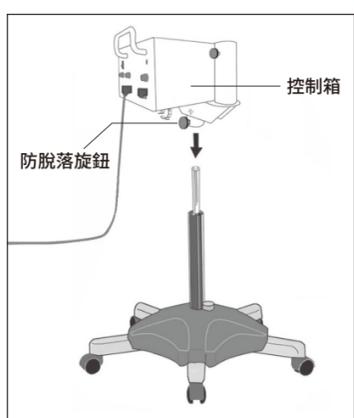


1. 取出控制箱
2. 將控制箱底部的圓形孔座對準氣壓棒上端套上，在稍微用力壓緊。
3. 將控制箱防止脫落旋鈕旋緊。

## 組裝支撐手臂

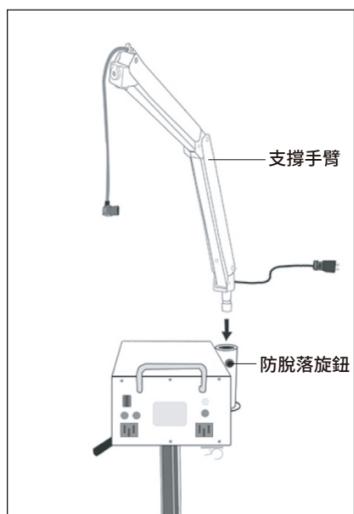


1. 取出手臂
2. 將支撐手臂直接插入控制箱旁的圓柱孔內。
3. 將手臂防止脫落旋鈕轉入，使支撐手臂不會脫落，但能旋轉。


## 組裝照射器

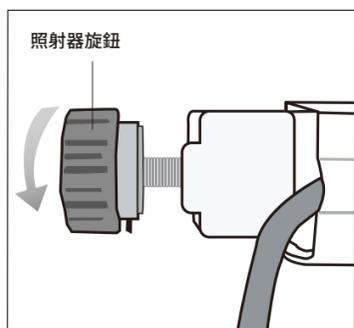

1. 將暫鎖於支撐手臂上之照射器旋鈕取下。

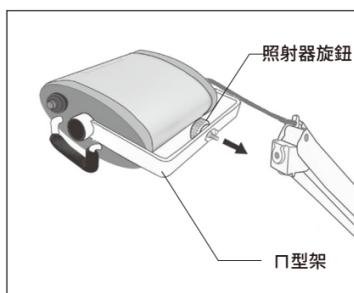

2. 將照射器旋鈕穿過照射器的U型架中孔。
3. 對準手臂上接頭的螺絲孔旋緊（鎖緊時務必注意卡槽是否卡入，確保接頭和手臂密切接合）。
4. 轉動照射器檢查是否轉動順暢。

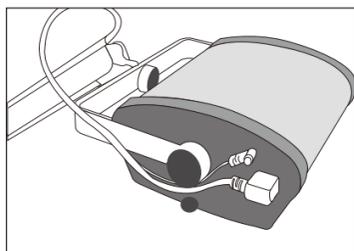


5. 手臂兩條電源線插入照射器的插座（請確認插頭是否插到底）。

## 控制箱電源線插入



1. 將手臂下端兩條電源線插入控制箱後方的輸出插座。
2. 將機箱電源線插入後方控制箱左側插座，另一端接電源插座。（請確認所有插頭需插到底）

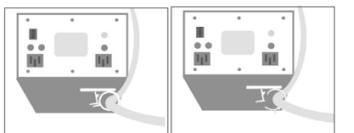

3. 可將手臂電源線從電線固定座缺口放入並扣緊，避免電線晃動。

## 照射器安全距離桿



1. 將安全距離桿插入照射器左端之凹槽內，並將左側「固定螺絲」旋緊固定。